

<p>Sistema Socio Sanitario  Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani</p> <p> Regione Lombardia ASST Lodi</p> <p>Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi Dipartimento dei Servizi</p>	<h2>Crioglobuline</h2>	Cod.: SI. 42 Rev. 0
Laboratorio Analisi		Data: 25/11/2022 Pagina 1 di 1

Materiale e modalità di prelievo:

- Provette **SENZA** anticoagulanti (3 provette da siero con tappo trasparente da 5 mL ognuna)
- Provette e aghi butterfly (in quantità necessaria) riscaldati in termostato a 37°C per almeno 30 minuti prima di effettuare il prelievo al paziente



- Non è richiesto digiuno.
- Dopo il prelievo, le provette vengono conservate in termostato a 37°C e poi portate in laboratorio in un contenitore termico preriscaldato a 37°.
- In assenza di un contenitore termico, le provette devono essere portate immediatamente in laboratorio dopo il prelievo, tenendole strette nel pugno di una mano, utilizzando i PDI/DM.