

<p>Sistema Socio Sanitario  Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani</p> <p> Regione Lombardia ASST Lodi</p> <p>Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi Dipartimento dei Servizi</p>	<h1>Lattato</h1>	Cod.: SI.43 Rev. 0
Laboratorio Analisi		Data: 25/11/2022 Pagina 1 di 1

Materiale per il prelievo:

- Provetta fluoruro di sodio / ossalato di potassio (tappo grigio da 2 mL)
- Ghiaccio /siberino



Modalità di prelievo:

- Il paziente deve stare a riposo prima del prelievo del campione. In particolare è bene evitare il movimento di mani e braccia. Non è richiesto digiuno.
- Il prelievo viene di solito eseguito senza l'utilizzo del laccio emostatico o con un laccio emostatico che non viene rilasciato durante il prelievo di sangue.
- Subito dopo il prelievo, mettere la provetta in un contenitore con ghiaccio o con un panetto refrigerante e consegnare entro un'ora in laboratorio
- **N.B. La provetta NON deve essere a contatto diretto col ghiaccio o col panetto refrigerante (per es. avvolta in un batuffolo di cotone o delle garze)**